




Blackfin Aero: montáž brýlových čoček

Blackfin Aero části

- Ⓐ Demo čočky
- Ⓑ Nosník
- Ⓒ Stranice

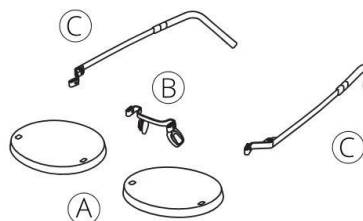


Dioptrické čočky

Doporučené s indexem 1.6, 1,67, TVX 153 a PC

Nelze použít na čočky s indexem 1.5, 1.5 (fotochromatické s UV filtrem), 1.74


Nářadí k montáži

- Ⓓ soubor s příponou OMA
- Ⓔ UV lepidlo
- Ⓕ jehla \varnothing 0,40 mm
- Ⓖ UV lampa
- Ⓗ Optické kleště

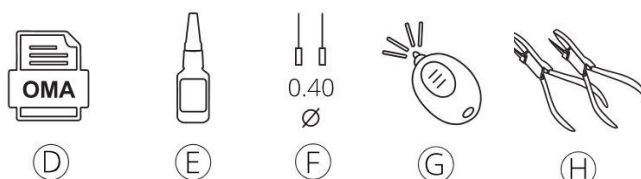


Návod

Vyjměte všechny části z demo čoček:

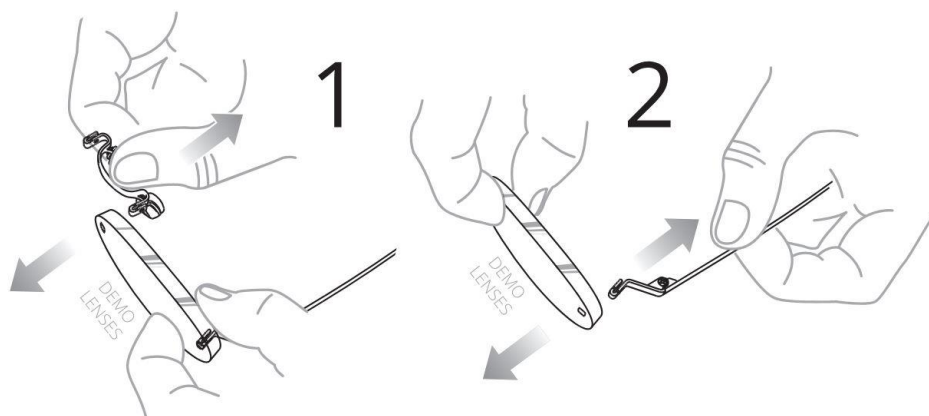




Ořízněte čočky dle pokynů v souboru OMA nebo manuálně přeměřením čočky dle přiloženého návodu:

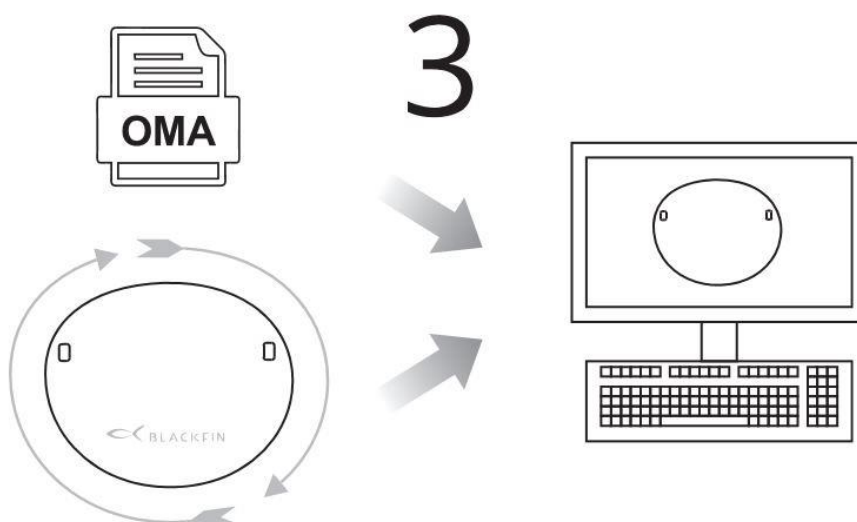


Průměr vrtáku:

Ø 0.90 mm

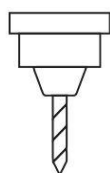

OK

Ø 1.00 mm

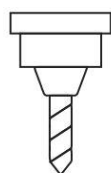


OK

Ø 1.10 mm




NO

4

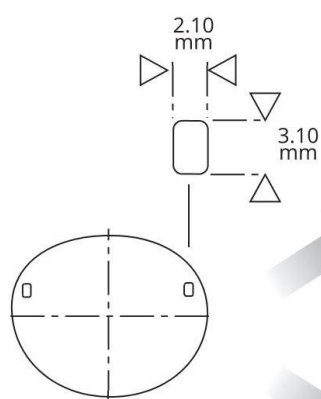

METODA A
pomocí souboru OMA

METODA B
manuálně

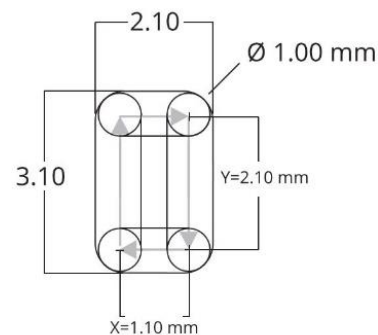


Upozornění: aby bylo zajištěno správné nasazení čoček, ujistěte se, že je velikost otvorů stejná, jako na obr. 4




Varování:




Nikdy neohýbejte úhel zakřivení, vždy musí být **rovnoběžně**.

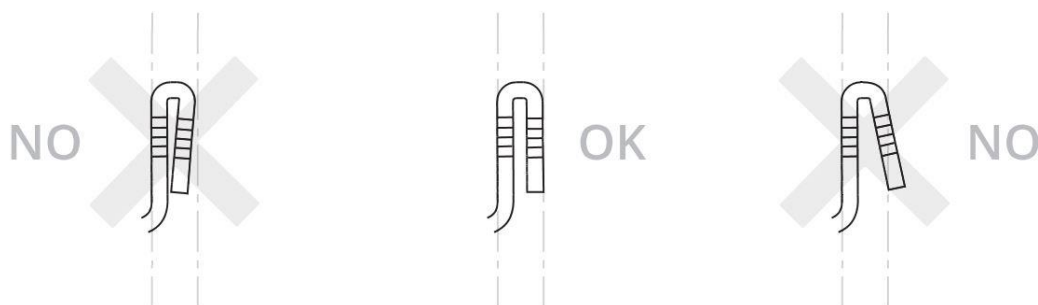

Pomocí jehly \varnothing 0.40 mm naneste na otvory háčků u nosníku malé množství UV lepidla (obr.5 a 6).

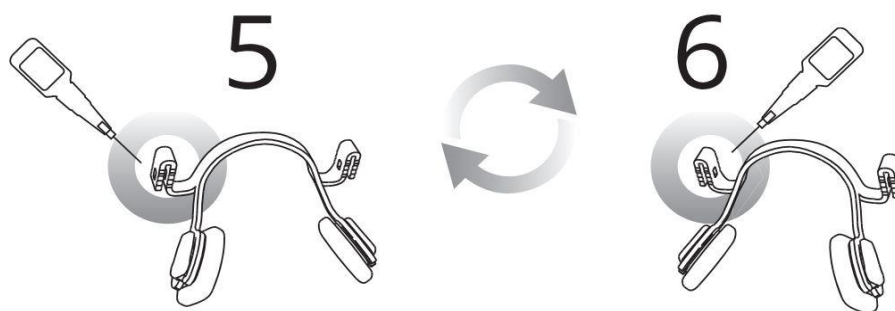

Připevněte háčky k ččkám a ujistěte se, že jsou správně zasunuty (obr.8). Zkontrolujte, zda je přední strana správně vyrovnaná (obr.9). **Vysušte pod UV lampou po dobu 10 sekund.**

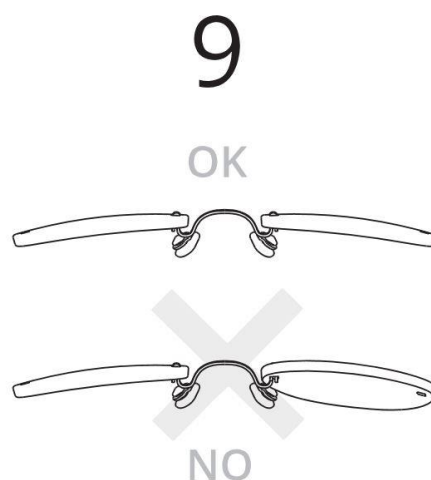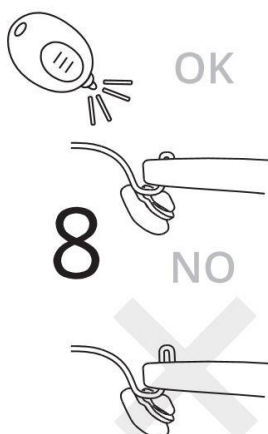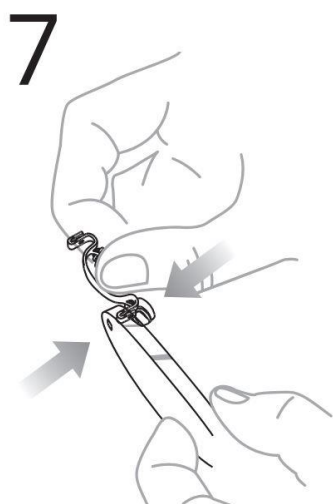




Pomocí jehly \varnothing 0.40 mm naneste na otvory háčků u stranic malé množství UV lepidla (obr. 10 a 11)




Zafixujte oka stranic do čočky a ujistěte se, že jsou háčky správně zasunuty (obr.13) a stranice jsou správně nakloněny tak, aby byl pantoskopický úhel 7° jak je znázorněno na obr. 14.

Vysušte pod UV lampou po dobu 10 sekund.

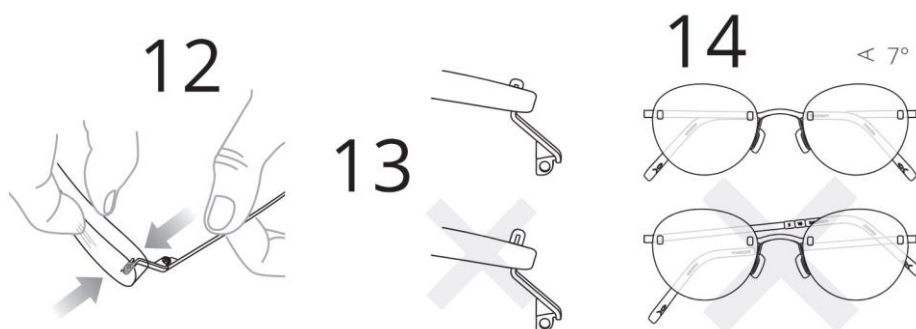

TIP:

Abyste zajistili správné přilnutí UV lepidla, počkejte před užíváním několik hodin. Pomocí dvou kleští provedte další úpravy pantoskopického úhlu a úhlu stranice u spánku pro zajištění pohodlného nošení obruby.

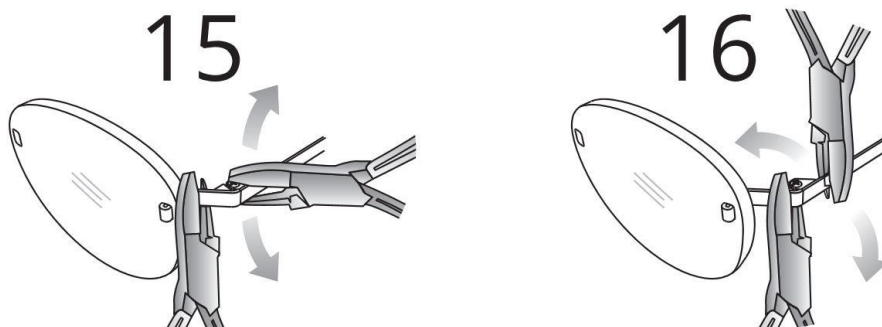

Varování:


S jednotlivými díly vždy zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození jejich povrchové úpravy



Blackfin Aero: demontáž brýlových čoček


Nářadí k montáži k demontáži

- Ⓐ odstraňovač UV lepidla
- Ⓑ jehla \varnothing 0,40 mm

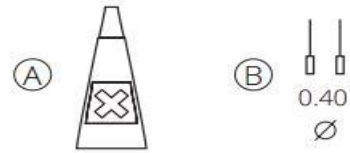

Návod

Pomocí jehly \varnothing 0,40 mm naneste malé množství odstraňovače UV lepidla do otvoru na zadní straně čoček. Nechte několik hodin působit a poté vyjměte části a očistěte od zbývajících UV lepidla. V případě potřeby přidejte další odstraňovač UV lepidla.

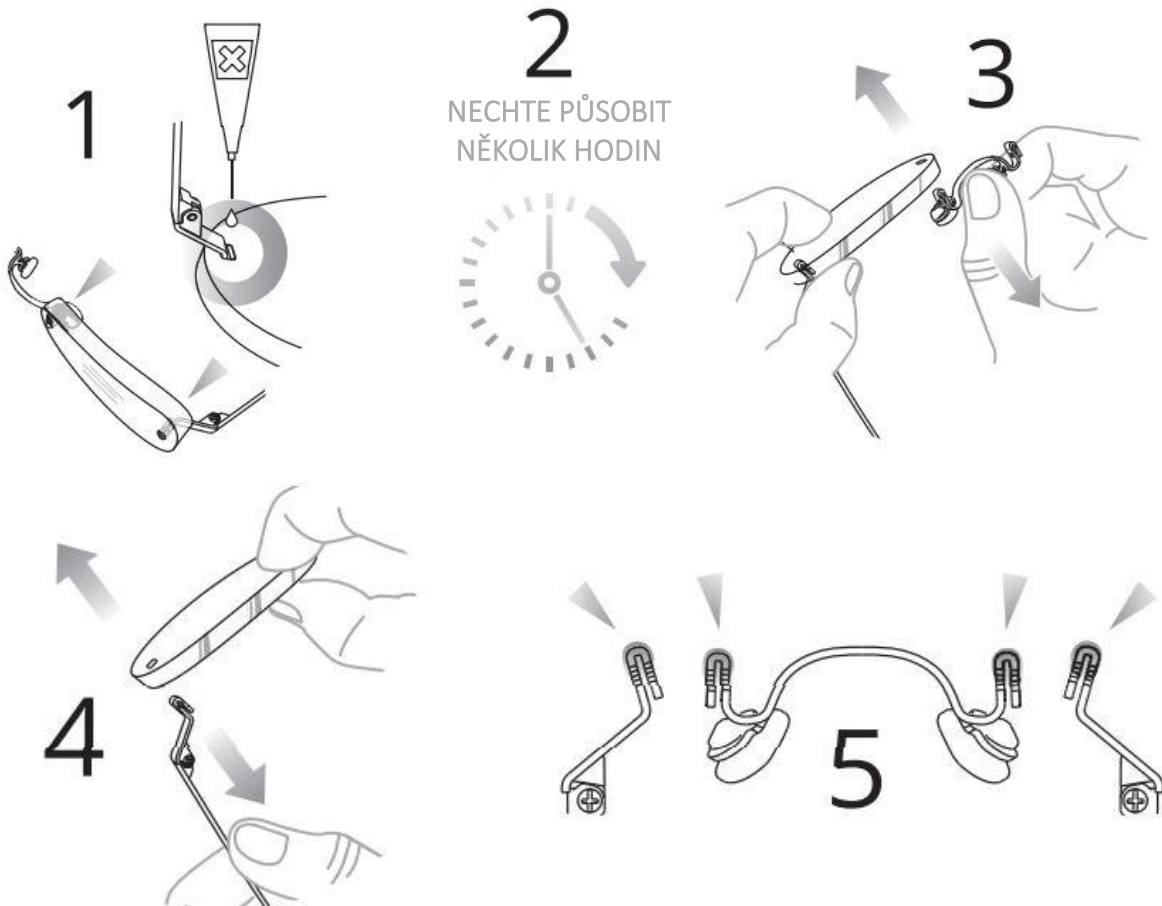



Na koho se obrátit v rámci zábrusu a servisu brýlových čoček

Zábrus brýlových čoček

Pokud budete chtít se zábrusem pomoci, neváhejte se obrátit na:

OPTICKÁ MANUFAKTURA, s.r.o.

Hoblíkova 567/27

613 00 Brno, Česká republika

Tel. +420 511 115 235

E-mail: info@optickamanufaktura.cz

Zasílat můžete přímo na výše uvedenou adresu přes **TNT – Chytrá distribuce**.
Tímto dopravcem Vám bude zasláno zboží i zpět na Vaši optiku.

Dodavatel brýlových obrub **BLACKFIN** pro CZ a SK:

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

Železná 2, 619 00 Brno

E-mail: sagitta@sagitta.cz

Tel. +420 511 440 500






Blackfin Aero: inštalácia okuliarových šošoviek

Blackfin Aero náhradné diely

- Ⓐ Demo šošovky
- Ⓑ Nosník
- Ⓒ Stranice

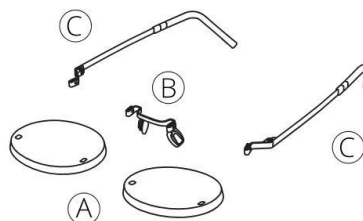


Dioptrické šošovky

Odporúčané s indexom 1.6, 1,67, TVX 153 a PC

Nie je možné použiť na šošovky s indexom 1.5, 1.5 (fotochromatické s UV filtrom), 1.74


Náradie na montáž

- Ⓓ súbor s príponou OMA
- Ⓔ UV lepidlo
- Ⓕ ihla \varnothing 0,40 mm
- Ⓖ UV lampa
- Ⓗ Optické kliešte

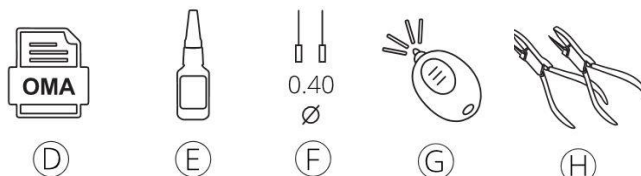


Návod

Vyberte všetky časti z demo šošoviek:

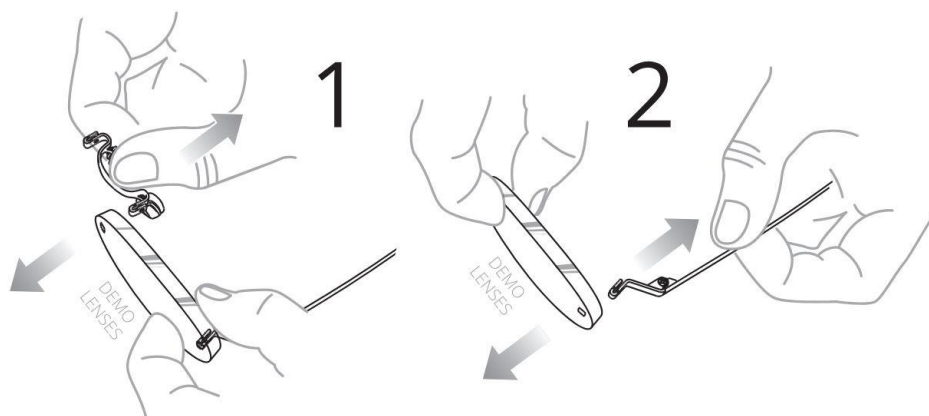




Orežte šošovky podľa pokynov v súbore OMA alebo manuálne premeraním šošovky podľa priloženého návodu :

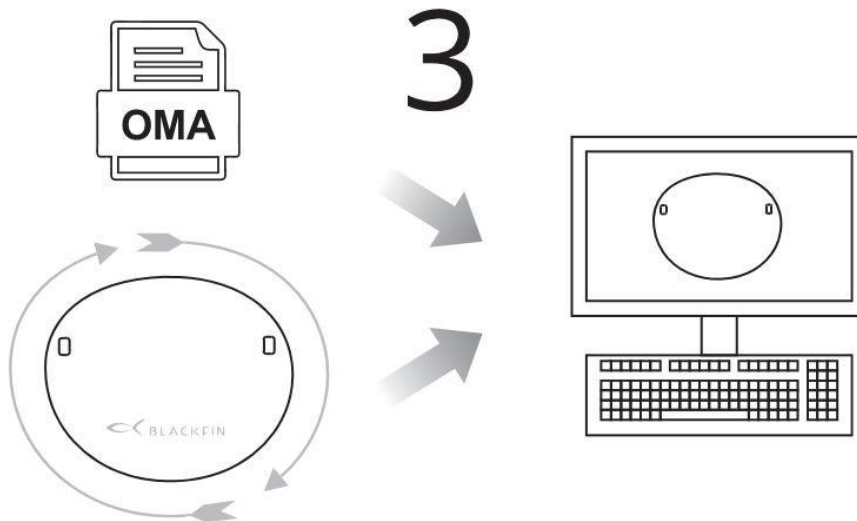


Priemer vrtáka:

Ø 0.90 mm

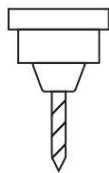

OK

Ø 1.00 mm

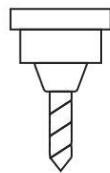


OK

Ø 1.10 mm




NO

4

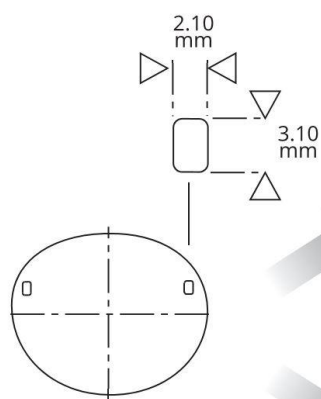

METÓDA A
pomocou súboru OMA

METÓDA B
ručne

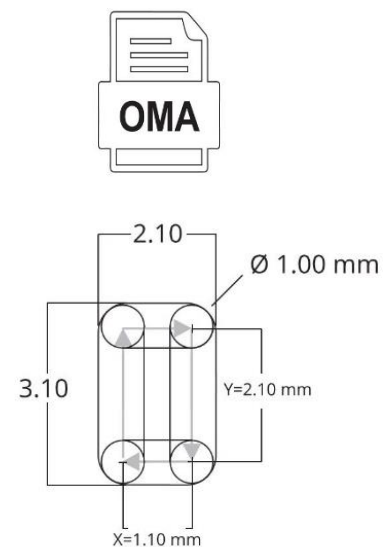


Upozornenie: aby bolo zaistené správne nasadenie šošoviek, uistite sa, že je veľkosť otvorov rovnaká, ako na obr. 4




Varovanie:


Nikdy neohýbajte uhol zakrivenia, musí byť vždy rovnobežný.

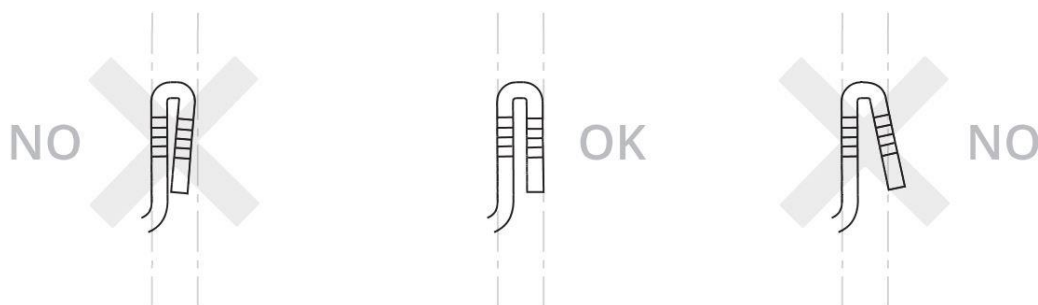

Pomocou ihly \varnothing 0.40 mm naneste na otvory háčikov pri nosníku malé množstvo UV lepidla (obr.5 a 6).

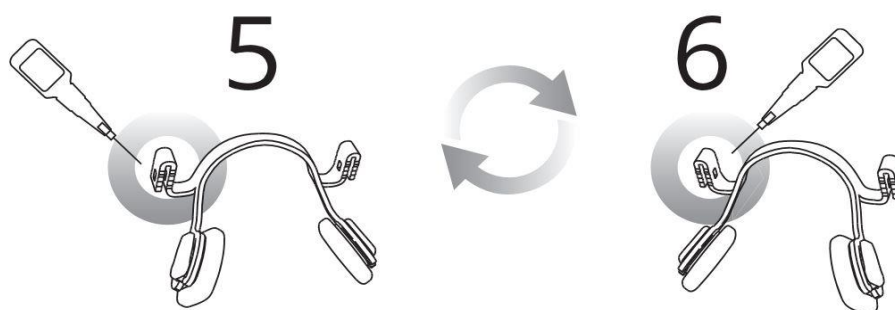

Pripevnite háčiky k šošovkám a uistite sa, že sú správne zasunuté (obr.8). Skontrolujte, či je predná strana správne vyrovnaná (obr.9). Vysušte pod UV lampou po dobu 10 sekúnd.

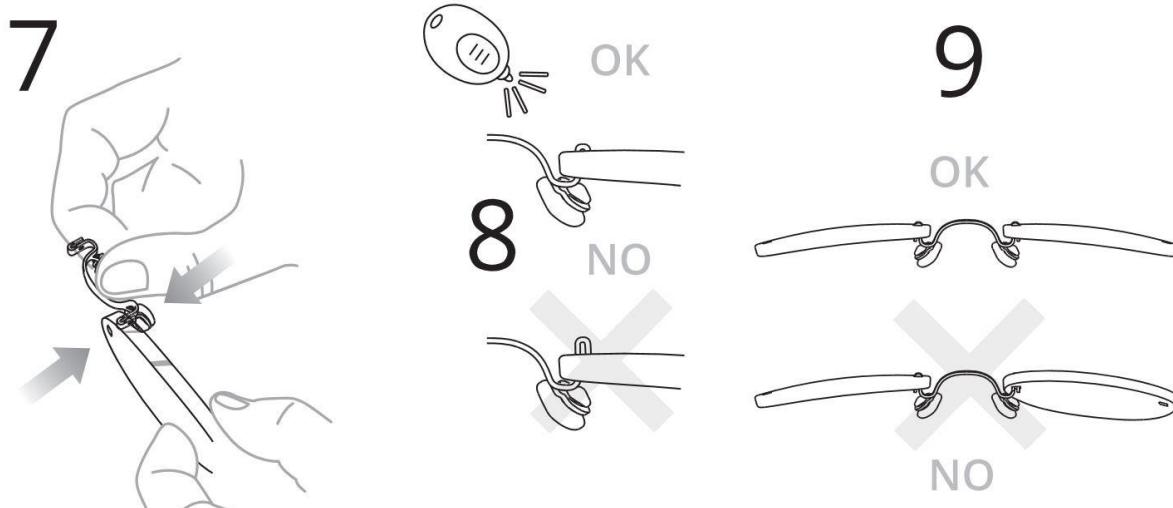




Pomocou ihly \varnothing 0.40 mm naneste na otvory háčikov pri stranicách malé množstvo UV lepidla (obr. 10 a 11).




Zafixujte oká straníc do šošovky a uistite sa, že sú háčiky správne zasunuté (obr.13) a stranice sú správne naklonené tak, aby bol **pantoskopický uhol 7°** ako je znázornené na obr. 14.

Vysušte pod UV lampou po dobu 10 sekúnd.

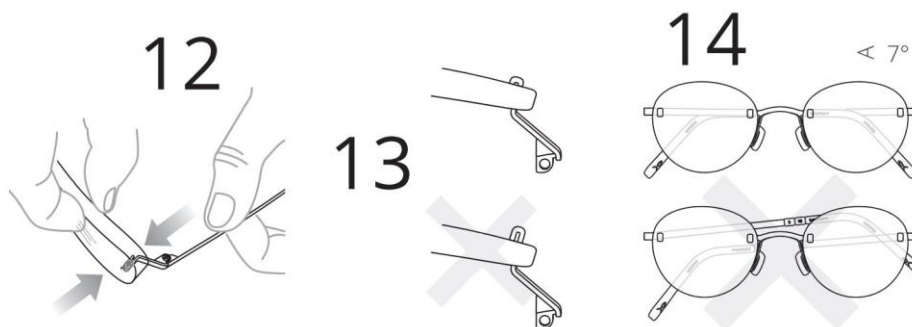

TIP:

Aby ste zaistili správne priľnutie UV lepidla, počkajte pred užívaním niekoľko hodín. Pomocou dvoch klieští vykonajte ďalšie úpravy pantoskopického uhla a uhla stranice pri spánku pre zaistenie pohodlného nosenia rámu.

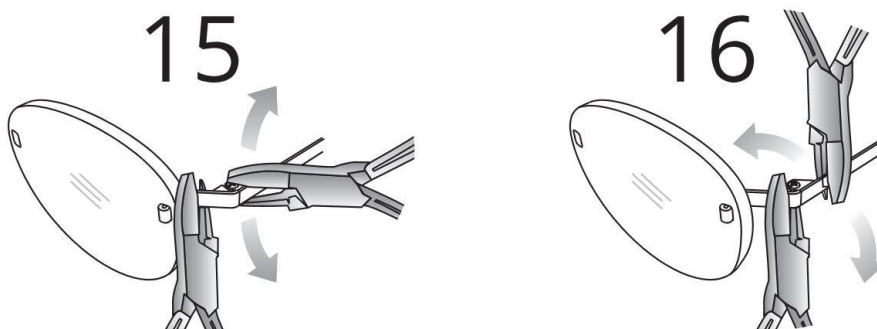

Varovanie:

S jednotlivými dielmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu ich povrchovej úpravy




Blackfin Aero: demontáž okuliarových šošoviek

Náradie na montáž a demontáž


Ⓐ odstraňovač UV lepidla

Ⓑ ihla \varnothing 0,40 mm

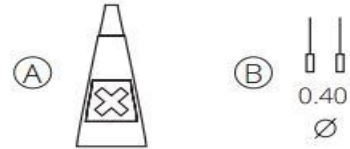

Návod

Pomocou ihly \varnothing 0,40 mm naneste malé množstvo odstraňovača UV lepidla do otvoru na zadnej strane šošoviek. Nechajte niekoľko hodín pôsobiť a potom vyberte časti a očistite od zvyšného UV lepidla. V prípade potreby pridajte ďalší odstraňovač UV lepidla.

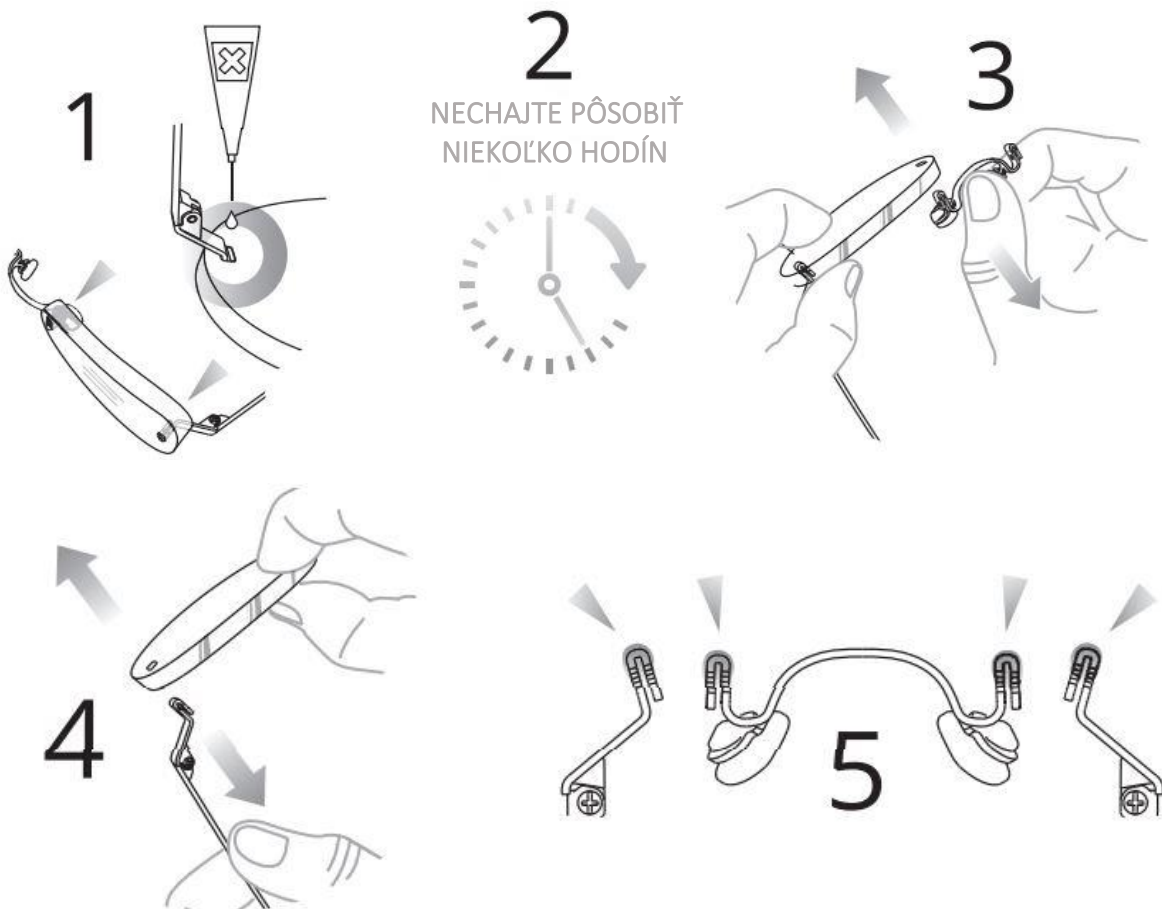



Na koho sa obrátiť v rámci zábrusu a servisu okuliarových šošoviek.

Zábrus okuliarových šošoviek:

Ak budete chcieť so zábrusom pomôcť, neváhajte sa obrátiť na:

OPTICKÁ MANUFAKTURA, s.r.o.

Hoblíkova 567/27

613 00 Brno, Česká republika

Tel. +420 511 115 235

E-mail: info@optickamanufaktura.cz

Priamo na vyššie uvedenú adresu môžete poslať prostredníctvom **TNT – chytrá distribuce.**

Týmto dopravcom Vám bude zaslaný tovar aj späť na Vašu optiku.

Dodávateľ okuliarových rámov BLACKFIN pro CZ a SK:

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

Železná 2, 619 00 Brno

E-mail: sagitta@sagitta.cz

Tel. +420 511 440 500

